


貼り方の手順

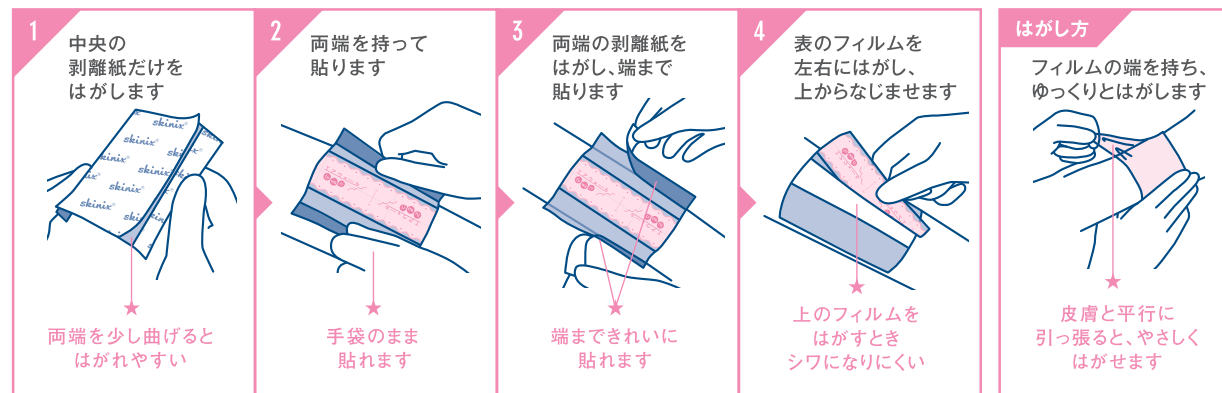

※シングルスリット、および50mm幅の製品は貼り方が異なります。パッケージにある貼り方の手順をよく読んでご使用ください。

未滅菌ロール状フィルムドレッシング

用途: ガーゼ・パッドなどの被覆固定、入浴・シャワー時の防水、
ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆など。



エアウォールふ・わ・り規格表

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			内装	外装	
				販売希望小売価格	入数	JAN [4971620]		ケース	GTIN [14971620]
エアウォールふ・わ・り (5M)	NO.50	50mm×5m	MA-E5050FT	1,300円	1巻	860625	-	16巻	860622
	NO.100	100mm×5m	MA-E5100FT	2,350円	1巻	860632		12巻	860639
	NO.150	150mm×5m	MA-E5150FT	3,250円	1巻	860649		8巻	860646
エアウォールふ・わ・り (12M)	NO.50	50mm×12m	MA-E050-FT	2,800円	1巻	860564	6巻		860561
	NO.100	100mm×12m	MA-E100-FT	5,100円	1巻	860571	4巻	4箱	860578
	NO.150	150mm×12m	MA-E150-FT	7,100円	1巻	860588	2巻		860585
エアウォールふ・わ・り (20M)	NO.5020	50mm×20m	MA-E2050FT	4,500円	1巻	860595	-	12巻	860592
	NO.1020	100mm×20m	MA-E2100FT	8,200円	1巻	860601		8巻	860608
	NO.1520	150mm×20m	MA-E2150FT	11,400円	1巻	860618		4巻	860615
エアウォールふ・わ・り シングルスリット	NO.1020	100mm×20m	MA-E2100FS	8,200円	1巻	860700	-	8巻	860707
	NO.1520	150mm×20m	MA-E2150FS	11,400円	1巻	860717		4巻	860714

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

【使用上の注意】●エアウォールふ・わ・りは、未滅菌です。直接カテーテル挿入部や創部に貼付しないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるときつきにくい場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。★ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。



株式会社 共和 www.skinix.jp
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

お問い合わせ先
メディカルグループまで
大阪 TEL: 06-6658-8217
FAX: 06-6658-8101
東京 TEL: 03-5634-3843
FAX: 03-5634-3845

XF012 17.03-10.000 第6版

超・ゼロ感覚フィルムドレッシング

エアウォール

fu wa ri