


## フレームタイプ

オモテにガイドスリット付きの四角い枠があります。

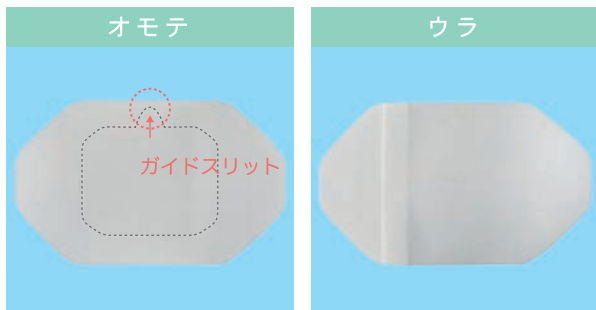


No.70Fを使用して説明しています。



オモテ面にある中央の四角い紙をはがします。周りのフレームは、はがさないでください。



ウラ面の剥離紙を全てはがします。端の糊が付いていない部分を持ち手にしてください。

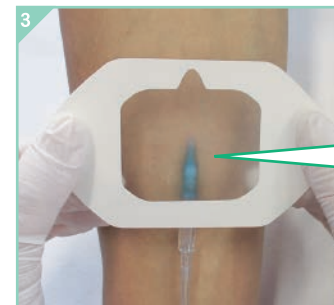

穿刺部がフレームの中央にくるように確認しながら位置を合わせます。




中央にあるガイドスリットを参考にすると、穿刺部を中心に合わせやすくなります。




すきまなく貼るためにカテーテルの周りをきちんと押さえながら貼ります。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。

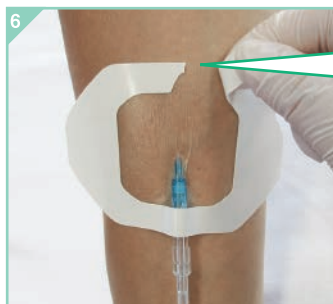


フレームのガイドスリット部分をつまんでちぎります。

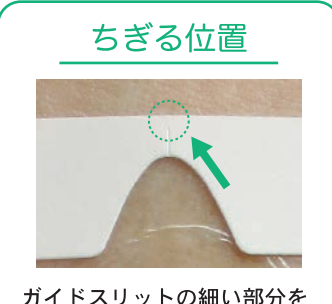

ガイドスリットの細い部分をちぎります。



フィルムがはがれないようにテープの端を押さえながら、フレームをゆっくりはがします。

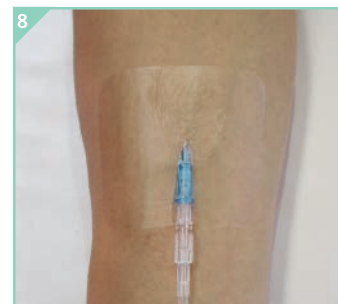

完成。カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。

## カテーテル周辺のすきま比較!




当社従来品 (20ミクロンフィルム)



エアウォールIV (7ミクロンフィルム)

極薄7ミクロンフィルムのすきま! こんなにも差があります。

## “エアウォールふ・わ・り”でベーステープ! ～肌にやさしいルート固定方法～

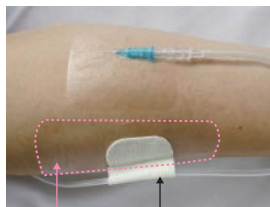

エアウォールふ・わ・り 粘着力の強いテープ

“エアウォールふ・わ・り”は肌に密着するように貼りつき、角質剥離を抑えるフィルムドレッシングです。ルートを固定するテープの下に“エアウォールふ・わ・り”を貼っておくと、はがす際の皮膚への刺激を軽減できます。

skinix®

株式会社 共和 www.skinix.jp  
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28  
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16  
営業所:札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所:熊本

お問い合わせ先  
メディカルグループまで  
大阪 TEL:06-6658-8217  
FAX:06-6658-8101  
東京 TEL:03-5634-3843  
FAX:03-5634-3845