


レギュラータイプ

オモテにセンターガイドがあります。

オモテ

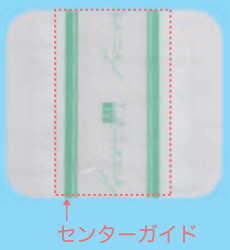

センターガイド


ウラ



No.6070Rを使用して説明しています。No.4050Rは剥離紙の形状が異なります。




ウラ面の大きい剥離紙をはがします。残りの剥離紙は持ち手にするので、はがさないください。

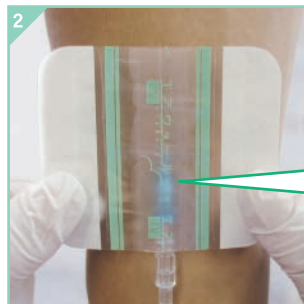


テープの両端を持って、穿刺部がテープの中央へくるように合わせます。

合わせる位置

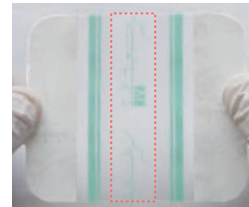


カテーテルをセンターガイドの文字に重ねると、中心に合わせやすくなります。

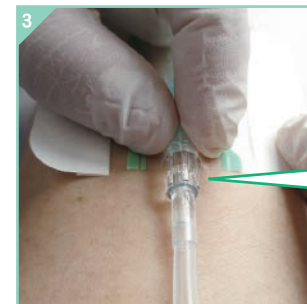

すきまなく貼るためにカテーテルの周りをきちんと押さえながら貼ります。

密着のコツ

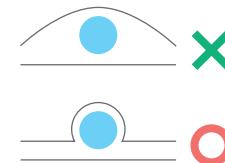

のせるのではなく包み込むように貼ると、より密着させることができます。



両端の剥離紙をはがし、テープを端まで貼ります。




テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



センターガイドの端から、オモテのフィルムをゆっくりはがします。



カテーテルを押さえながら、残りのフィルムもゆっくりはがします。

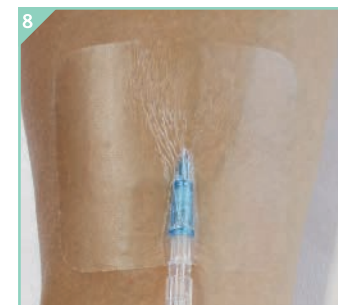

完成。カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。


カテーテル周辺のすきま比較!



当社従来品 (20ミクロンフィルム)
極薄7ミクロンフィルムのすきま! こんなにも差があります。



“エアウォールふ・わ・り”でベーステープ! ～肌にやさしいルート固定方法～

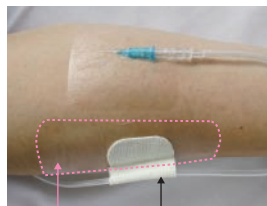

エアウォールふ・わ・り 粘着力の強いテープ

“エアウォールふ・わ・り”は肌に密着するように貼りつき、角質剥離を抑えるフィルムドレッシングです。
ルートを固定するテープの下に“エアウォールふ・わ・り”を貼っておくと、はがす際の皮膚への刺激を軽減できます。

skinix®

株式会社 共和 www.skinix.jp
大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所:札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所:熊本

お問い合わせ先
メディカルグループまで
大阪 TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101
東京 TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845