


貼り方の手順



MDRPU対策用クッション・ドレッシング(未滅菌)

用途: 圧迫が気になる箇所での減圧ケア

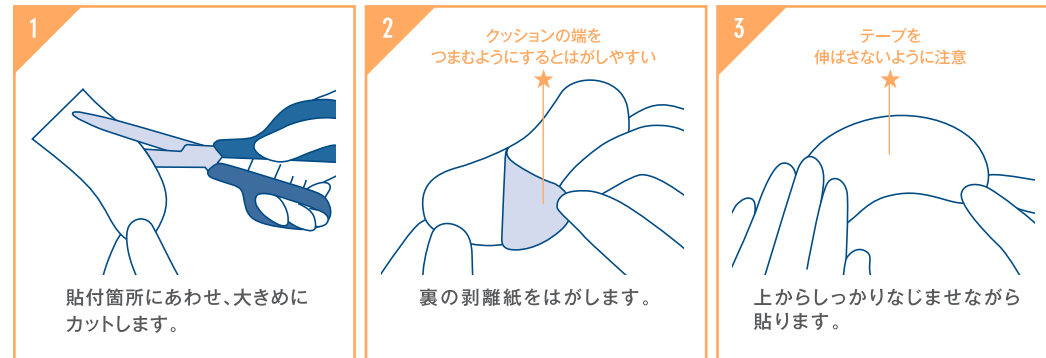

2016年12月発売予定

ココロール

ココロール規格表

| 品名    | 規格     | サイズ      | 品名コード    | 個装       |    |               | 内装 | 外装  |                 |
|-------|--------|----------|----------|----------|----|---------------|----|-----|-----------------|
|       |        |          |          | 販売希望小売価格 | 入数 | JAN [4971620] | 入数 | ケース | GTIN [14971620] |
| ココロール | NO.50  | 50mm×2m  | YB-27050 | 2,500    | 1巻 | 892039        | 6巻 | 4箱  | 892036          |
|       | NO.100 | 100mm×2m | YB-27100 | 4,200    | 1巻 | 892046        | 4巻 |     | 892043          |

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

【使用上の注意】●ココロールは未滅菌ですので、直接創部に貼らないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭き取り、清潔にしてください。水気があるときにくい場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水泡等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●油分の多い部位に貼るとはがれやすいため、顔や頭部に貼る場合は注意して使用してください。●使用中はよく肌の状態を確認してください。●ココロールは弾力性のある商品ですが、圧迫しすぎるとテープの弾力性が損なわれる場合がありますので注意して使用してください。●本品は医療関連機器の使用法を守った上で使用してください。●ココロールは医療機器ではありません。【貯蔵及び保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。

skinix®

株式会社 共和 [www.skinix.jp](http://www.skinix.jp)  
 大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28  
 東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16  
 営業所: 札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所: 熊本

お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL: 06-6658-8217  
 FAX: 06-6658-8101

東京 TEL: 03-5634-3843  
 FAX: 03-5634-3845

ZZ017 16.10-3,200 第2版

