

# 箱がそのままテープケースに

サージカルテープと間違えない、便利で使いやすいエコパッケージ!

①

## ナノテアケース

パッケージの箱をそのまま組み立てれば、テープケースとして大変身。箱に入れたまま使用できるので、サージカルテープと間違える心配なし。



②

## めくりしろキーパー

めくりしろがすぐわかるようなキーパー部分を設計。テープがサッと取り出しやすく効率的。

③

## 芯ストッパー

テープの芯をしっかりホールド。早く巻きだしても、テープが箱から飛び出さずに使用できます。

## 固定用テープ

用途: ガーゼ・パッドなどの固定

## ナノテアフィット規格表

品名	規格	サイズ	品名コード	個装			内装		外装	
				販売希望 小売価格	入数	JAN [4971620]	入数	ケース	GTIN [14971620]	
ナノテアフィット	NO.19	19mm×5m	YB-S1905	500円	1巻	892206	12巻	4箱	892203	
	NO.25	25mm×5m	YB-S2505	670円	1巻	892213	12巻		892210	

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



【使用上の注意】●未滅菌ですので、傷口に直接貼らないでください。●シリコンゲルを使用しています。シリコンに対してアレルギー体質の方は、医師又は薬剤師に相談してから使用してください。●皮膚トラブルを起こしやすい方は、医師又は薬剤師に相談してから使用してください。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●貼付部分は清潔にしてください。水分や油分、汚れがあるとつきにくい場合があります。●防水ではありません。水に濡れると、はがれたり、粘着剤が肌に残る場合があります。●使用中は肌の状態をよく確認してください。●底粘着性の設計ですので、強い粘着性を要求される用途には使用しないでください。

【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®  
www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社:〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28  
TEL: 06-6658-8217  
FAX: 06-6658-8101  
東京本社: 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16  
TEL: 03-5634-3843  
FAX: 03-5634-3845


密着の力で進化した、やさしさ。"ゲルテープ、  
ナノテアフィット

# 固定テープのやさしさは、 “ゲル”の密着力で進化した。 脆弱な肌に、 ナノテアフィット

固定テープの交換でも傷つきやすい脆弱な肌。  
神経を使って処置をしてもトラブルが起こる…。  
そんな現場の心配や不安に、「密着」の力で応えたナノテアフィット。  
トラブルを引き起こす原因から見つめ直し、  
特殊開発のゲルで今までのテープとはまったく違うやさしい肌離れを実現しました。  
ナノテアフィット。脆弱な肌の裂傷リスクを減らし、今までにないやさしさをお届けします。

## 「肌のひっぱり」が大きなダメージを生んでいた。

スキンテア(テープをはがすときに起こる皮膚の「めくれ、や「裂け、」などの肌トラブルは、これまで角質剥離が原因だと考えられてきました。ところが、テープをはがす時に肌にかかるもっと大きな力は、肌のひっぱり。この力が、厚みや柔軟性の減った脆弱な肌には大きな負担となり、肌の「めくれ、や「裂け、」といったトラブルを起こす主要原因の一つだと気づいたのです。

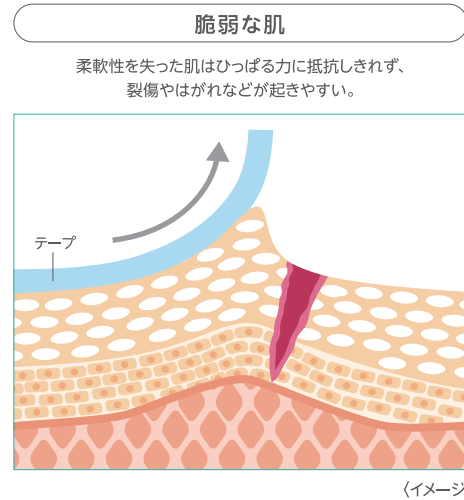

## 「肌をひっぱらない」を、とことん追求。

そもそも肌のひっぱりの原因は、テープの粘着。ひっぱりを減らそうと粘着力を弱めると、固定力も下がってしまいます。つまり肌へのやさしさと固定力は相反するものなのです。この難題に、私たちは「粘着にたよらないテープ」という発想の転換で応えました。粘着の代わりに密着力で固定する、新開発「ゲルテープ」です。


美容フェイスマスクがやさしく顔に貼りつくように、肌にやわらかく密着する、特殊開発「もちりゲル」で、はがす時も肌離れがよく、脆弱な肌を強くひっぱりません。このゲルで、両立できなかった「やさしさ」と「固定力」を同時に実現しました。



## 「密着」の力で、固定テープはここまでやさしくなった。

このひっぱりの差は「もちりゲル」の貼りつき構造の違いにあります。従来の粘着剤は粗い「点」状に貼りついていて、一点一点が肌と強く粘着するため、はがす時にどうしても肌をひっぱってしまいます。一方この「もちりゲル」は、肌のキメの細かい凹凸にも「面」でピタッと密着し、肌に大きな力をかけることなく安定してついています。だからはがす時に肌を強くひっぱることなく、スツとやさしく肌離れするのです。しなやかな不織布も、ゲルの密着度をさらに高めてくれます。

### 同じように見えても、貼りつきの構造には大きな違いが。

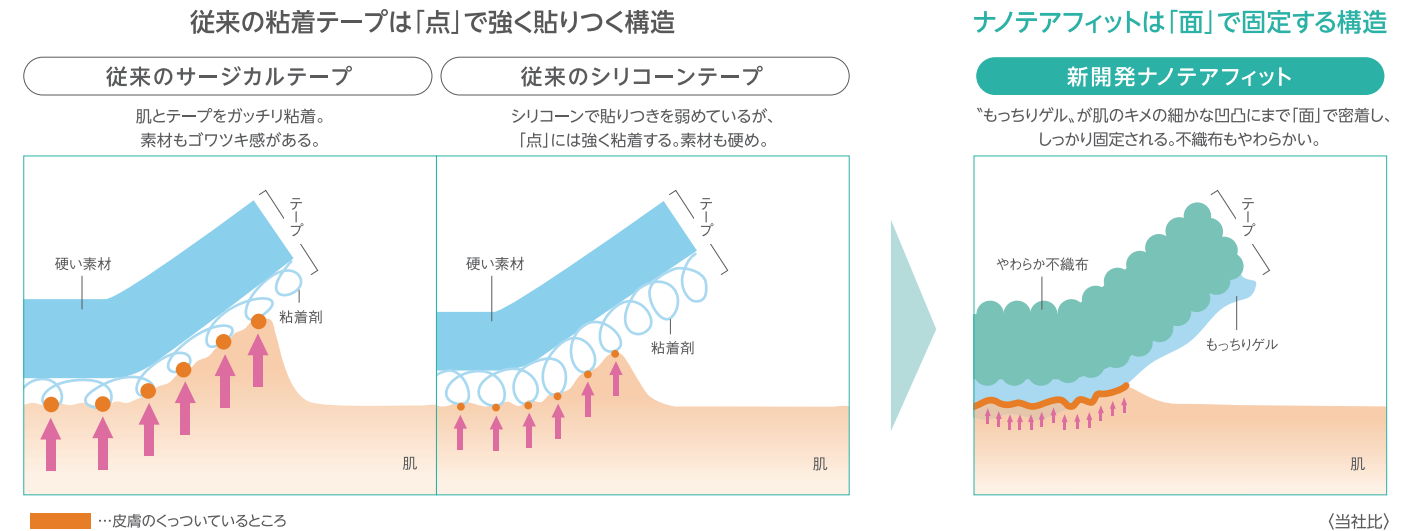

## もう、テープ交換の不安に悩まない。

脆弱な肌へのテープ交換は、とても神経を使うもの。それでもスキンテア(皮膚の「めくれ、や「裂け、」)は起こりがちでした。そんな看護師さんの心配や不安に、少しでも安心して使っていただける、**新発想「ナノテアフィット」**です。

### ＜ 使用感アンケートで、看護師さんの満足度80%以上! \* ＞

医療現場で働く看護師さんに、「ナノテアフィット」を実際に使用していただき、実感を伺いました。

