

マスクやゴーグルの“痛み”でお困りではありませんか？

skinix®

クッション・ドレッシング


ココロール で 個人防護具の痛みとMDRPU※を対策

※医療関連機器圧迫創傷

長時間の個人防護具の装着による圧迫は“痛み”の原因となり、深刻化すれば“MDRPU（医療関連機器圧迫創傷）”につながりかねません。器具圧迫をやわらげるクッション・ドレッシング「ココロール」なら、切って貼るだけで、マスクやゴーグルによる肌への圧迫を手軽に軽減することができます。

マスク

耳介に当たるマスクのひもに、図のように貼り付けます。紐を挟むように貼り付けるとはがれにくくなります。

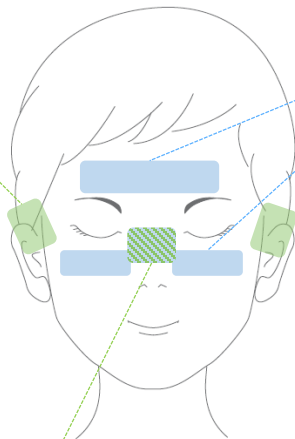

ゴーグル

感染対策用のゴーグルが当たって圧迫されるとところに貼り付けます。



こんな使い方も！

内側に貼って、ズレ防止に

鼻が当たる部分に貼ればココロールの表面の摩擦力によりマスクがズレにくくなり、マスクの位置を調整しなおすために手で触る回数を減らせます。



※ココロールを使用する場合はフィッティングテストを必ず実施し密着性を確認してください。

※MDRPU対策実施にあたっては感染対策担当部門と相談して実施してください。

器具圧迫をやわらげる
“クッション・ドレッシング”

ココロール



高クッション性で
しっかり減圧



1.5mmと薄くても器具の圧迫をしっかり吸収する高クッション性。重ね貼りも可。

切って貼るだけで
いつでもサッと使える



どこにでも惜しまず使えるロールタイプで経済的。

弾性ストッキングや
NPPVマスクなどにも使えます。



規格	サイズ	品名コード	標準希望小売価格	入数
No.50	50mm×2m	YB-27050	2,500円	1巻
No.100	100mm×2m	YB-27100	4,200円	1巻

※標準希望小売価格には消費税は含まれておりません。

テープが医療にできること、もっと。

skinix®

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

TEL: 06-6658-8217

FAX: 06-6658-8101

東京支店：〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL: 03-5634-3843

FAX: 03-5634-3845

札幌・仙台・福岡