

貼り方ガイド

【末梢静脈カテーテル固定用】

フレームタイプ

No.70F / No.120Fの2サイズ



動画はこちら



器具の痛みにも しっかり対処を! 「ココロール カテ用」

フィルムの不快感を解消したら、器具（ロック部分）の圧迫による不快感や痛みにも、「ココロール カテ用」でぜひ対処を。

ロック部分の下にサッと貼るだけで、圧迫を分散して痛みを起きにくくし、MDRPU（医療関連機器褥瘡）リスクも軽減します。


ココロール カテ用は
こちら



No.70Fを使用して説明しています。



オモテにある中央の四角い紙をはがします。周りのフレームは、まだはがさないでください。

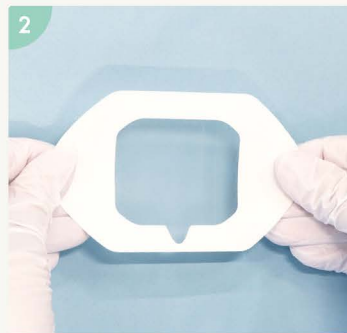


ウラの剥離紙を全てはがします。端の粘着剤が付いていない部分を手にしてください。



刺入部がフレームの中心にくるように、確認しながら位置を合わせます。

Point

ガイドスリットがロック部分に重なるようにすると、刺入部を中心に合わせやすくなります。

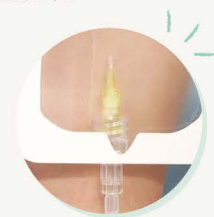

スキマなく貼るために、カテーテルの周りを押さえながら貼ります。

Point

カテーテルに沿わせて、包み込むように貼ると、より密着させることができます。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



Point

ガイドスリットの細かい部分をちぎります。

完成!*



スキマなく貼るために、カテーテルの周りを押さえながらフレームをはがします。



カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。

テープが医療にできること、もっと。

skinix
www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社:〒557-0051 大阪市西成区備前3-20-28
TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京本社:〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845