

貼り方ガイド

【末梢静脈カテーテル固定用】


レギュラータイプ

オモテにセンターガイドがあります。



動画はこちら

オモテ

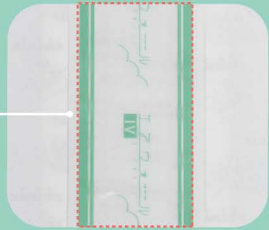

センターガイド

ウラ



貼り方
イラスト付き

器具の痛みにも しっかり対処を！ 「ココロール カテ用」

フィルムの不快感を解消したら、器具（ロック部分）の圧迫による不快感や痛みにも、「ココロール カテ用」でぜひ対処を。

ロック部分の下にサッと貼るだけで、圧迫を分散して痛みを起きにくくし、MDRPU（医療関連機器褥瘡）リスクも軽減します。

ココロール カテ用は
こちら



No.6070Rを使用して説明しています。No.4050Rは剥離紙の形状が異なります。



ウラの大きい剥離紙をはがします。残りの剥離紙は持ち手にするので、まだはがさないでください。




テープの両端を持って、刺入部がテープの中心へくるように合わせます。



Point

中心に合わせるコツ

カテーテルをセンターガイドの文字に重ねると、穿刺部を中心に合わせやすくなります。

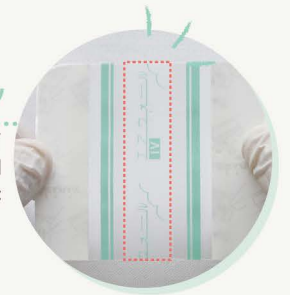

テープの両端を持って、穿刺部がテープの中心へくるように合わせます。



Point

密着のコツ

カテーテルに沿わせて包み込むように貼ると、より密着させることができます。




両端の剥離紙をはがし、テープを端まで貼ります。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



センターガイドの端から、オモテのフィルムをゆっくりはがします。

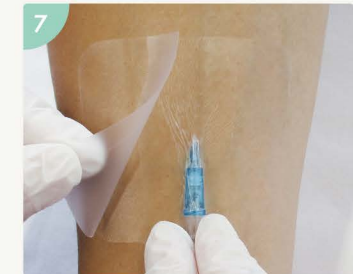

カテーテルを押さえながら、残りのフィルムもゆっくりはがします。

完成!!

カテーテルがしっかり固定されているか、確認してください。

テープが医療にできること、もっと。

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社:〒557-0051 大阪市西成区鶴3-20-28
TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京本社:〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845