

【MDRPU 対策マニュアル用】画像集（2021 年 6 月版）

- ※ 画像を院内のマニュアルにお使いの際は、「画像提供：スキニックス」と表示してください。
- ※ 解像度の高い jpg 画像をご希望の方は skinix までお気軽にご依頼ください（お問い合わせ先：<https://www.skinix.jp/inquiry/>）。
- ※ 当資料を、他施設の方にお渡しすることはお控えください。

★注意点

- ・ココロールをご使用の際は担当の医師・看護師に相談してお使いください。
- ・治療の妨げになる場合や、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- ・カットサイズは目安です。患者さまの身体のサイズに合わせて調整してください。

★MDRPU 対策の基本

・ MDRPU とは？



・ MDRPU 対策のポイント




・ チューブ固定は「Ω 留め (オメガどめ)」




★患者さま向けの MDRPU 対策

●NPPV マスクなどに


・ NPPV マスクで圧迫されやすいところ

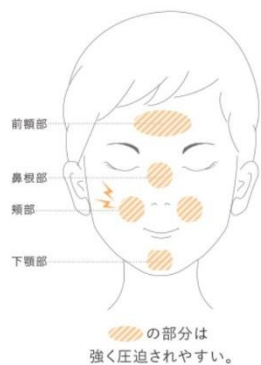

・ ココロールを貼る場所

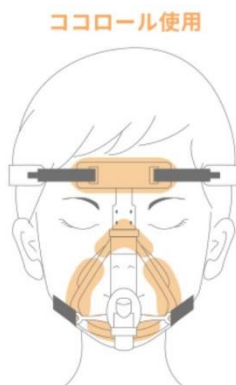

・ カット形状の見本と貼り方

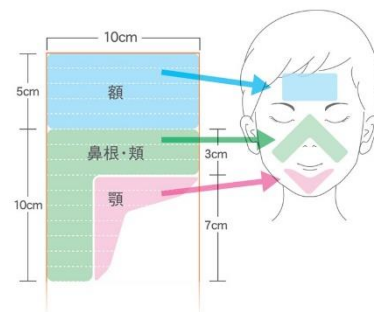

・ カットするときのコツ

1. 端から斜めに谷折りします。



2. 3cm の幅の長方形にカットします。



3. 残った三角形の部分を①で半分にカットし、②でもう一度カットします。



4. 開くとききれいな左右対称に。




・ 貼付した状態



●酸素マスクなどに

・カット形状の見本

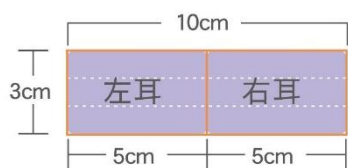

・貼り方




・貼付した状態




●酸素カニューレなどに

・カット形状の見本と貼り方

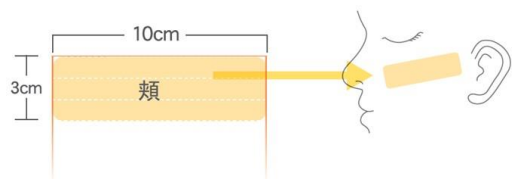


●血管留置カテーテルなどに

・血管留置カテーテルで圧迫されやすいところ

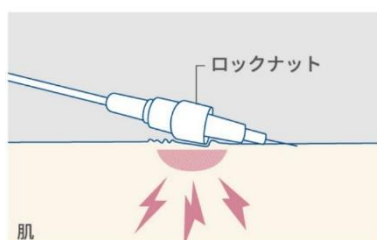

・ココロールを貼る場所

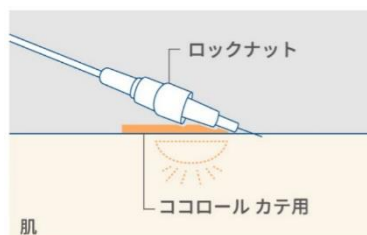

・貼り方 (ロック部分がフィルムの中の場合)



・貼り方 (ロック部分がフィルムの外の場合)




・貼付した状態（ロック部分がフィルムの外の場合）




●弾性ストッキングなどに


・カット形状の見本（履き口に）

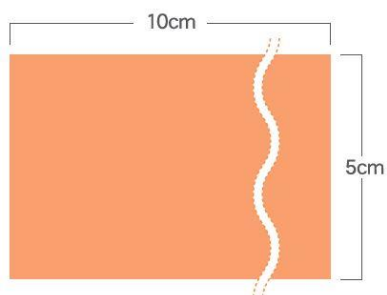


・貼り方（履き口に）

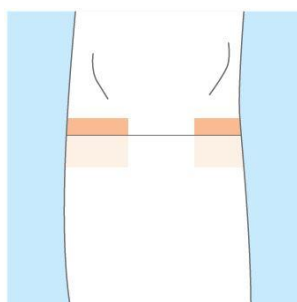

・カット形状の見本（脛骨の突出箇所に）

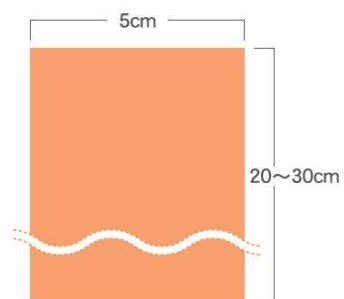


・貼り方（脛骨の突出箇所に）

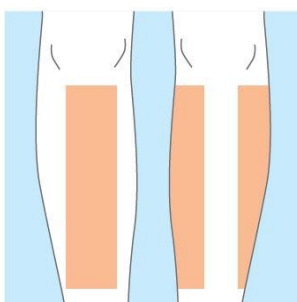


●シーネなどに

・カット形状の見本

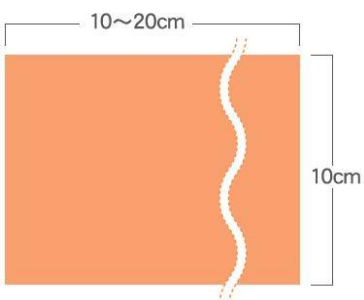


・貼り方

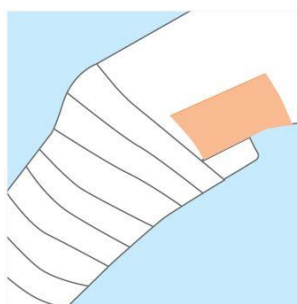


●パルスオキシメーターなどに

・カット形状の見本

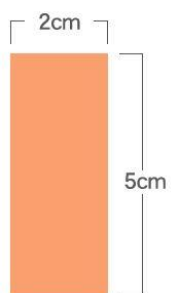


・貼り方

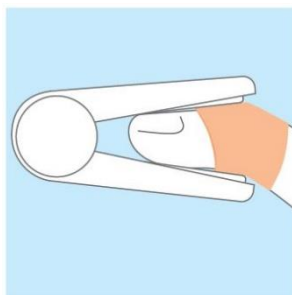


●気管切開カテーテルの固定具のベルトなどに

・カット形状の見本

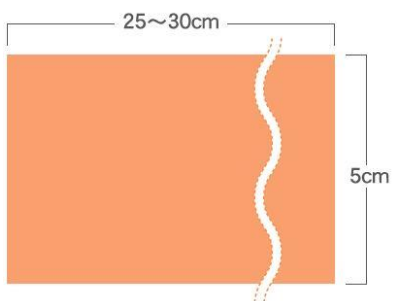


・貼り方

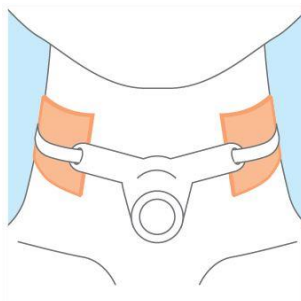


●（ケアのコツ）貼付中に観察したいとき

1 ココロールをケアしたい箇所に貼ります。

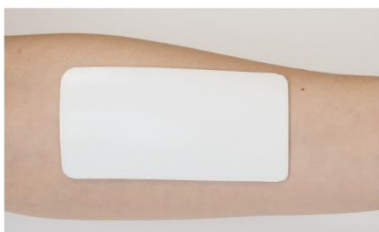

2 観察しやすい一辺をあけるように、上からエアウォールふ・わ・り（伸縮性の高いフィルムドレッシング）を大きめに貼ります。

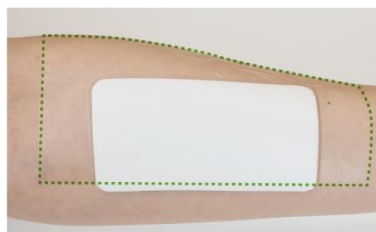


3 2であけておいた辺から皮膚を観察します。



★医療従事者の方向けの MDRPU 対策

●サージカルマスクなどに

・貼付した状態（耳に）

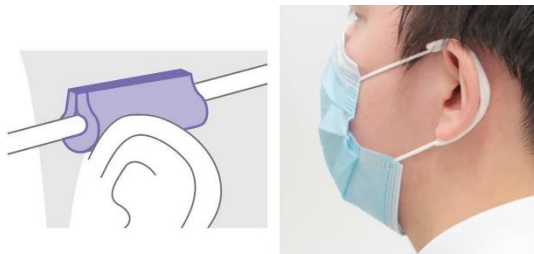

・貼付した状態（鼻に）



●ゴーグルなどに

・貼付した状態




★MDRPU 対策の事例（症例）

●血管留置カテーテルによる MDRPU の対策


・発生例



・対策を実施（フィルムの内側にクッション・ドレッシングを貼付）

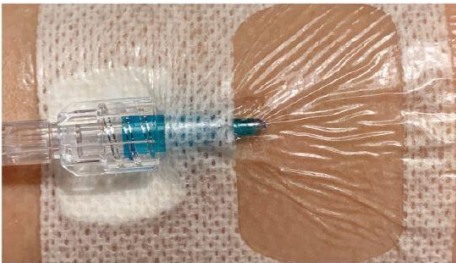

・対策を実施（フィルムの外側にクッション・ドレッシングを貼付）

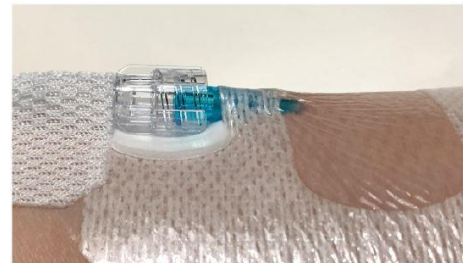

●NPPV マスクによる圧迫の軽減

・発生例



・対策を実施（マスクのフィッティング前）



・対策を実施（マスクのフィッティング後）



●弾性ストッキングによる圧迫の軽減

- ・ MDRPU リスクの高い部位



- ・ 対策を実施



※ 画像を院内のマニュアルにお使いの際は、「画像提供：スキニックス」と表示してください。

※ 解像度の高いjpg 画像をご希望の方は skinix までお気軽にご依頼ください（お問い合わせ先：<https://www.skinix.jp/inquiry/>）。

※ 当資料を、他施設の方にお渡しすることはお控えください。