

## Point

### 剥離紙の方眼の間隔は1cm

タテ方向は5cm毎に太い実線があります。カットするときの目安に。ペンで書き込みもできるので、細かい形に切る時も便利です。

### 角を丸くするとはがれにくい

角を丸くすると、端からめくり上がりにくくきれいに使用することができます。




## 【NPPVマスク】

圧迫される鼻根部や額に  
過度のリークが心配な頬に


NPPVマスク  
貼り方動画は  
こちらから



『ココロール』の動画ですが、ココロールミルでも同様に使用できます。

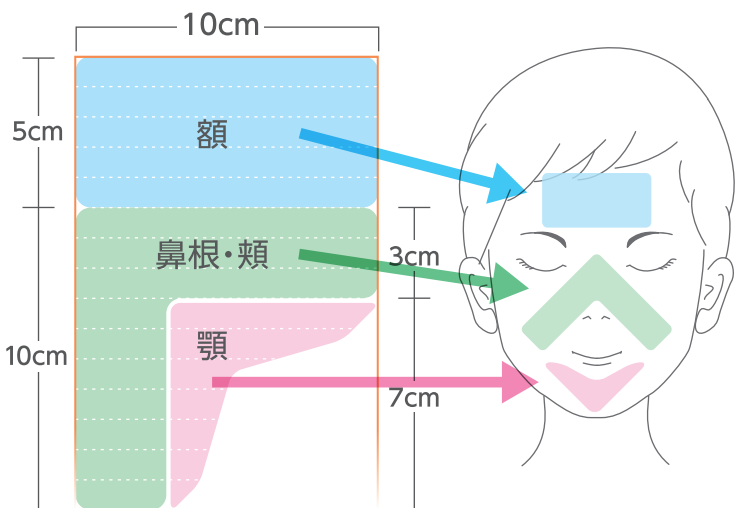

## Point カンタン! L字カット

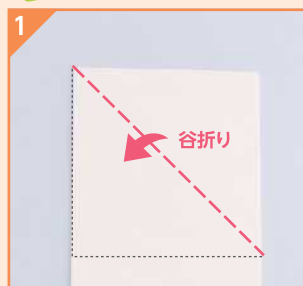

端から斜めに谷折りします。



3センチの幅の長方形にカットします。




残った三角形の部分を①で半分にカットし、②でもう一度カットします。



開くときれいな左右対称に。

## 【酸素カニューレ、酸素マスクなど】


カテーテルや紐で圧迫される耳介、頬に

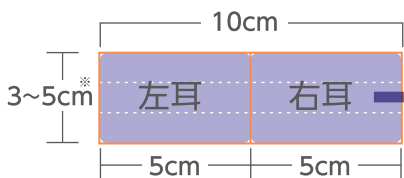

※カテーテルや紐のサイズに応じて調整してください。



カテーテルや紐を包むようにして  
粘着面を貼り合せると、はがれにくくなります。

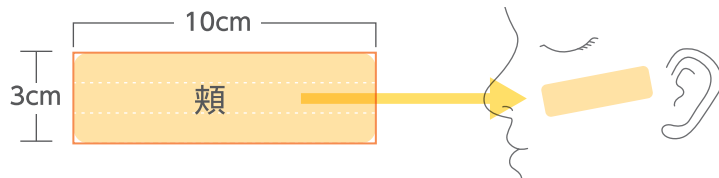

テープが医療にできること、もっと。

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社: 〒557-0051 大阪市西成区橋 3-20-28  
TEL: 06-6658-8217  
FAX: 06-6658-8101

東京本社: 〒135-0016 東京都江東区東陽 5-29-16  
TEL: 03-5634-3843  
FAX: 03-5634-3845

● カットサイズは目安です。患者様の体のサイズにあわせて調整してください。  
● 必要な箇所のみカットしてお使いください。

## 注意点



- 使用の際は担当の医師・看護師に相談してお使いください。
- 治療の妨げになる場合や、発疹・発赤・かゆみ等が現れた場合には使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- カットサイズは目安です。患者さまの身体のサイズに合わせて調整してください。



弾性ストッキング  
貼り方動画は  
こちらから





「ココロミル」の動画ですが、ココロミルでも同様に使用できます。

## 【弾性ストッキング】

膝下部分の履き口に

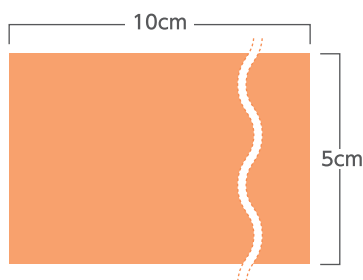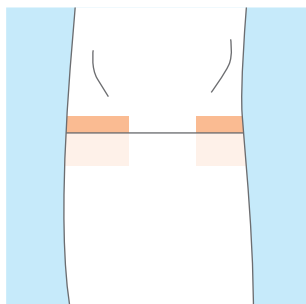



脛骨の突出している箇所に

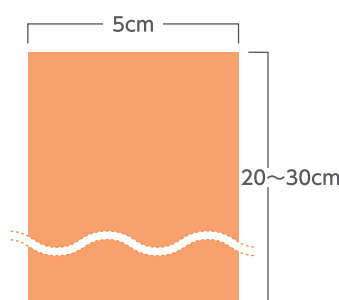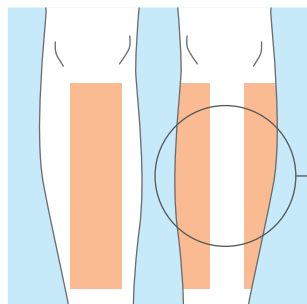

脛骨上に貼れない場合には、脛骨の左右に段差を埋めるように貼ります。

## 【シーネ】



末端部分の保護に

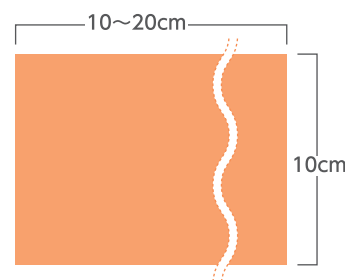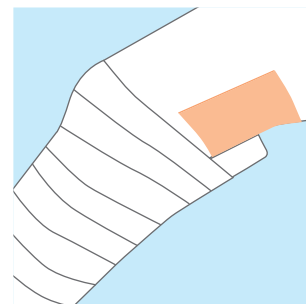

ストッキング装着時の摩擦が強く、ココロミルが剥がれる場合は、フィルムドレッシングでの固定をお勧めします。

## 【膀胱留置カテーテル】



下腹部や大腿部に

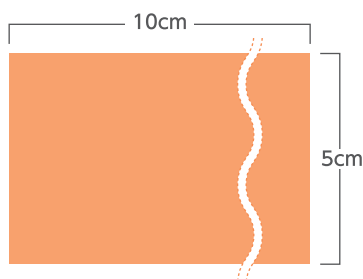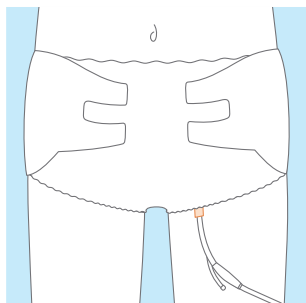

※カテーテルのサイズに応じて調整してください



## 【気管切開カテーテル】

固定具のベルト部に

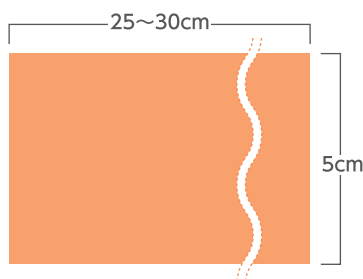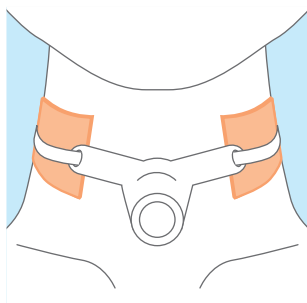

## 【末梢静脈カテーテル】

ロック部分の枕として

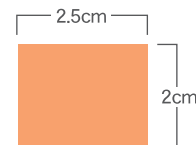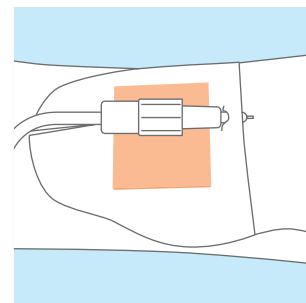

ココロミル 滅菌・カット済の「カテ用」もあります。



## Point 貼った後も、肌の状態をしっかり”ミル”

MDRPUベストプラクティスでは、「最低1日2回」、「視診・触診」による観察<sup>\*</sup>を推奨しています。一度剥がしてもまた貼れて、貼りはがしダメージも少ないココロミルで、肌観察を徹底・継続しましょう。



肌の小さな異常も見逃さない!